

MP4

MULTISCAN

Istruzioni e manutenzione



Fabbricante:
N&T System S.r.l.
via Beccaria, 54 - 47832 S. Clemente (RN) - ITALIA
tel. +39 0541 857468 - fax +39 0541 857653
www.ntsystm.biz - info@ntsystm.biz

Distribuito da:

Tutti i diritti riservati

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, copiata o divulgata con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di **N&T System S.r.l.** Eventuali infrazioni saranno perseguite nei modi e nei tempi previsti dalla Legge. Tutti i nomi ed i marchi citati in questo manuale sono di proprietà dei rispettivi fabbricanti.

*Gentile Cliente,
ci congratuliamo con Lei per la scelta effettuata.
Ha ora a sua disposizione **MP4 Multiscan**, un prodotto dalle grandi prestazioni, costruito secondo le più recenti e severe normative europee, ed in grado di garantire un elevato standard di qualità e di sicurezza.
La preghiamo di prestare molta attenzione a questo manuale leggendolo in ogni sua parte al fine di familiarizzare con **MP4 Multiscan**.*

N&T System S.r.l.

Introduzione

Questo documento tecnico descrive le norme per il corretto uso e la manutenzione utente dell'**MP4 Multiscan**.

Il rispetto delle norme e delle indicazioni qui riportate consentirà di utilizzarlo nel modo più sicuro possibile.

Informazioni

Se dopo la lettura persistono dubbi o incertezze sulle operazioni da svolgere, occorrerà contattare il Rivenditore di fiducia o il Costruttore.

MP4 Multiscan

Indice generale

<i>Descrizione</i>	<i>Pag.</i>
Descrizione dei componenti	2-3
Garanzia	4
Simbologia usata	4
Indicazioni generali di sicurezza	4
Dati tecnici	5
Identificazione	5
Modalità d'uso	6
Messa in funzione	7-8
Manutenzione	9
Accessori e parti di ricambio	10
Programmi terapeutici consigliati per l'uso dell'MP4	11


Descrizione dei componenti

- 1 Pulsanti multifunzione, permettono in relazione allo stato operativo:
a) *Attivare (START)/Interrompere (STOP) il trattamento*
b) *Aumentare/Diminuire la potenza di trattamento*
- 2 Connettore per manipolo di trattamento ultrasonico.
- 3 Led di funzionamento dei diffusori ultrasonici.
- 4 Connettori per i quattro diffusori ultrasonici.
- 5 Cavo di connessione all'apparecchio generatore di ultrasuoni.
- 6 Alloggiamento cavetto bipolare di alimentazione.
- 7 Diffusori ultrasonici a doppia testina
- 8 Base con attacco in velcro

Contenuto della confezione

- Dispositivo **MP4 Multiscan**
- 4 diffusori ultrasonici a doppia testina
- Alimentatore AC, input: 230V - 50Hz; output: 9V-200mA
- Manuale d'uso
- 4 kit con due fasce elastiche (60 cm e 100 cm)
- Un flacone di gel
- Velcro adesivo da applicare sul fondo dell'apparecchio per bloccare l'**MP4 Multiscan**.

L'apparecchio viene fornito di tutto l'equipaggiamento sopra indicato, pertanto una volta aperto l'imballo verificare che la dotazione sia completa. Qualora dovesse mancare qualche elemento, contattare il **Venditore**.

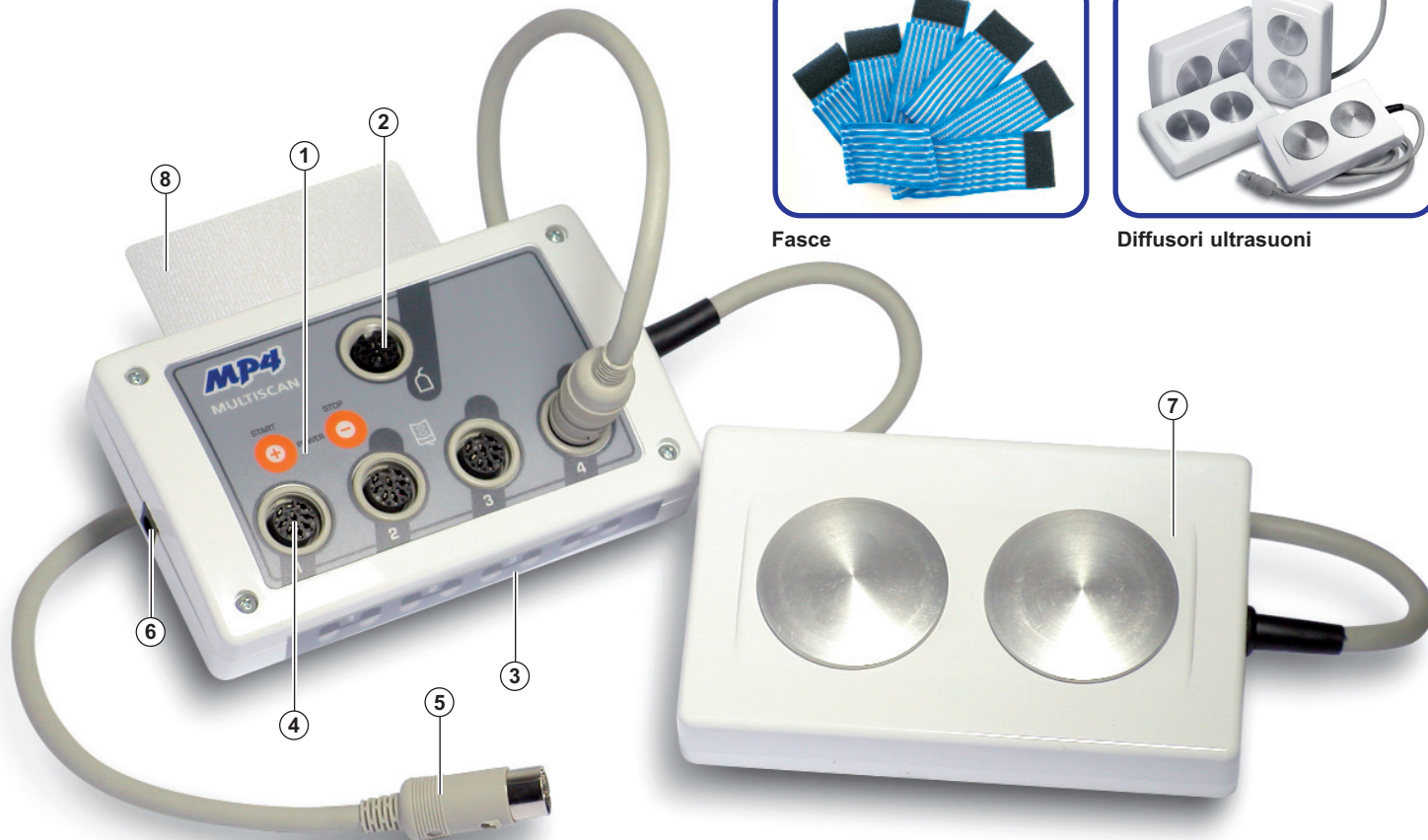

Fasce



Diffusori ultrasuoni

MP4 Multiscan

Garanzia

Ogni apparecchio **MP4 Multiscan** è oggetto di accurati controlli e viene collaudato prima di essere messo in vendita. Il consumatore è titolare dei diritti specificati dalla legislazione vigente. La garanzia ha la durata di due anni dalla data di acquisto ed è estesa a tutte le parti, ad eccezione di quelle soggette ad usura. Decade qualora l'apparecchio **N&T System** non venga utilizzato in modo appropriato o manomesso da personale non autorizzato, oppure se il difetto non è segnalato entro due mesi dalla data in cui si è manifestato. Le parti ritenute da **N&T System S.r.l.** difettose all'atto della fabbricazione verranno sostituite gratuitamente.

N&T System S.r.l.

Simbologia usata

Attenzione

Richiama l'attenzione su situazioni o problemi che potrebbero pregiudicare la sicurezza.

Informazioni

Richiama l'attenzione su importanti situazioni di carattere generale.

Indicazioni generali di sicurezza

Di seguito sono riassunte alcune indicazioni generali di sicurezza:

- *leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di procedere alla messa in funzione dell'apparecchio;*
- *non usare l'apparecchio in presenza di miscele infiammabili con aria o con ossigeno o con protossido di azoto, evitare assolutamente ambienti esplosivi e ambienti umidi o ambienti nei quali siano presenti grandi quantità d'acqua, in quanto l'apparato non è protetto contro l'abbondante penetrazione di liquidi.*
- *controllare, prima di ogni trattamento, l'integrità dell'alimentatore, dei*

cavetti dei diffusori ultrasonici e dei connettori;

- *per l'alimentazione dell'apparecchio utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione oppure richiederlo alla **N&T System S.r.l.**;*
- *non effettuare mai alcuna operazione sull'apparecchio con le mani umide o bagnate;*
- *non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia;*
- *prima di utilizzare l'apparecchio consultare il paragrafo relativo ai programmi disponibili sul manuale d'uso dell'apparecchio ad ultrasuoni;*
- *non appoggiare pesi, ed in particolare contenitori con liquido sull'apparecchio, non rovesciare liquidi sullo stesso;*
- *in caso di comportamento anomalo o di malfunzionamento, interrompere il trattamento e spegnere l'apparecchio, non cercare di aprire o di riparare l'apparecchio. Rivolgersi a **N&T System S.r.l.** per qualsiasi tipo di intervento o controllo.*


RAEE: Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio smesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti. I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

Dati Tecnici

ALIMENTAZIONE ELETTRICA AC

INPUT 230V - 50Hz
OUTPUT 9V - 200mA

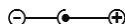

POTENZA MASSIMA ASSORBITA
CLASSE DI ISOLAMENTO ELETTRICO
TIPOLOGIA DELLE PARTI APPLICATE
FREQUENZA ACUSTICA DI LAVORO
POTENZA MASSIMA DI USCITA
DIAMETRO SUPERFICIE EMITTENTE
AREA DI RADIAZIONE EFFETTIVA

1,8W
II
B
1/3 Mhz
2,5W/cm²
50 mm
19,62 cm²

DIMENSIONI E PESI

ALTEZZA 3 cm
PROFONDITÀ 9 cm
LARGHEZZA 14,5 cm
PESO 0,3 kg

CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE PER IL FUNZIONAMENTO

TEMPERATURA [T]	+10 ÷ +40 °C
UMIDITA' [Ur]	30÷75 %
PRESSIONE ATMOSFERICA [mbar]	da 700 a 1060 mbar

CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE PER IL TRASPORTO E L'IMMAGAZZINAMENTO


Per il trasporto e l'immagazzinamento del **MP4 Multiscan** sono consigliate le seguenti condizioni ambientali:

TEMPERATURA [T]	0÷40 °C
UMIDITA' [Ur]	25÷75 %


Identificazione

- A** Costruttore.
- B** Marcatura CE.
- C** Attenzione, consultare la documentazione allegata.
- D** Effetti fisiologici: temperatura elevata.
- E** Tipologia delle parti applicate.
- F** Apparecchio di classe II
- G** Parte applicata di tipo B.
- H** Dati tecnici.
- I** Modello, N° di serie e anno.
- L** Smaltimento rifiuti: trattare separatamente dai rifiuti domestici"

APPARECCHIO

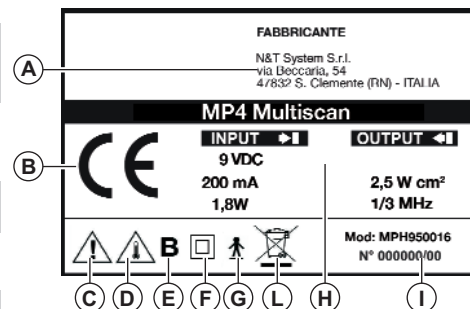

DIFFUSORE

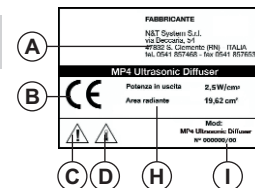

Nella parte posteriore dell'apparecchio e sul diffusore ad ultrasuoni sono apposte le targhe identificative con riportati i dati tecnici da comunicare al Centro di Assistenza Autorizzato, al Costruttore o al Rivenditore in caso di richiesta di informazioni o di assistenza tecnica.

Informazioni

Il danneggiamento, la rimozione o l'alterazione della targa identificativa deve essere immediatamente segnalata al Costruttore, al Centro Assistenza Autorizzato o al Rivenditore. Non saranno possibili interventi in garanzia se la targa identificativa risulta danneggiata, rimossa o alterata.

MP4 Multiscan

Modalità d'uso



MP4 Multiscan è un accessorio che espande i dispositivi di trattamento ultrasonici N&T System. Permette di distribuire gli ultrasuoni provenienti dall'apparato principale verso i quattro diffusori a doppia testina.

Gestito da un microprocessore riceve dall'apparecchio il segnale ultrasonico e lo distribuisce in modo alternato solamente ai diffusori realmente connessi. Oltre ai 4 diffusori è possibile connettere anche il manipolo di trattamento dell'apparecchio ad ultrasuoni recuperando così la connessione usata per collegare MP4.



Attenzione

MP4 Multiscan permette di distribuire i segnali ultrasonici generati dal dispositivo principale, indirizzandoli su diversi Diffusori/Manipoli di trattamento. Ne consegue che per tutti i programmi di trattamento Estetici e/o Terapeutici e per tutte le indicazioni e raccomandazioni si deve fare riferimento al manuale d'uso fornito con il dispositivo generatore di ultrasuoni.

I due pulsanti sul frontale dell'**MP4 Multiscan** permettono:


- di attivare il trattamento, tenendo premuto per circa 1sec il tasto **“START +”**;
- di interrompere il trattamento, tenendo premuto per circa 1sec il tasto **“STOP -”**;
- di aumentare o diminuire la potenza di trattamento tramite rispettivamente i tasti **“+”** e **“-”**.

Messa in funzione

Estrarre l'**MP4 Multiscan** dall'imballo, applicare il velcro adesivo sul fondo dell'apparecchio ultrasonico, lato destro (A). Tramite la base in metallo, con il velcro applicato, fissare l'**MP4 Multiscan** al dispositivo ultrasonico, lato sinistro (B).

Utilizzando l'alimentatore in dotazione, connettere **MP4** alla presa elettrica. L'accensione dei due led rossi in corrispondenza del CH-1 indica il "POWER-ON", quindi procedere come segue:

- 1) collegare il cavetto di connessione di **MP4** (5), alla presa predisposta per il manipo di trattamento dell'apparecchio ultrasonico, come illustrato in figura (C);
- 2) inserire su MP4 il manipo di trattamento o almeno uno dei 4 diffusori ultrasonici negli appositi connettori, da 1 a 4 (D);
- 3) accendere MP4, connettendo l'alimentatore in dotazione alla presa elettrica e al connettore di alimentazione (8), l'accensione di due led rossi in corrispondenza del CH-1 di MP4 indica il "POWER-ON";
- 4) accendere l'apparecchio ultrasonico e procedere alla selezione del programma di trattamento desiderato, come specificato sul manuale d'uso dell'apparato. A partire da pag. 11, sono riportati i programmi di trattamento consigliati con i relativi punti di applicazione dei diffusori;
- 5) versare, sulla superficie delle due calotte in alluminio dei diffusori, il GEL contenuto nell'apposito flacone (E), spalmandolo in modo uniforme, quindi posizionare i diffusori nelle parti da trattare (nostro esempio: esterno cosce), bloccandole con le fasce elastiche in dotazione (F);
- 6) premere il tasto **START** dell'apparecchio ultrasonico ed a seguire il tasto **START(+)** di **MP4** per far partire il trattamento. L'attività ultrasonica dei diffusori viene visualizzata con l'accensione dei relativi led rossi posti sul lato di MP4;
- 7) durante il trattamento con i tasti "+" e "-" di **MP4** è possibile aumentare o diminuire la potenza di trattamento;
- 8) durante l'esecuzione per interrompere il programma di trattamento o metterlo in pausa si deve intervenire sull'apparecchio ultrasonico come specificato nel relativo manuale d'uso e dopo tenere premuto il tasto **STOP(-)** di **MP4** per circa 1 sec.

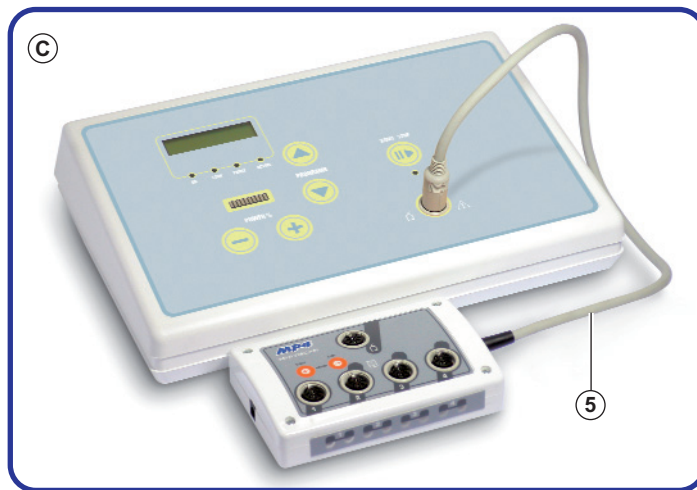

MP4 Multiscan



i Informazioni

Il microprocessore che gestisce l'MP4 riconosce la posizione e il numero di diffusori inseriti e distribuirà il segnale ultrasonico solamente in quelli utilizzati, visualizzando l'azione con l'accensione dei led relativi al canale, mentre il passaggio ultrasonico sul manipo di trattamento verrà evidenziato con l'accensione di tutti gli 8 led.

⚠ Attenzione

È vietata l'installazione dell'apparecchio:

- in ambienti umidi;
- in prossimità di grandi quantità di acqua;
- vicino a fonti di calore;
- ai raggi diretti del sole.


⚠ Attenzione

Non collegare e scollegare mai i diffusori, il manipo di trattamento o l'MP4 quando l'apparecchio è acceso.

CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA

⚠ Attenzione

Non utilizzare spine multiple o riduttori di corrente. Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente testata ed efficiente, dotata di messa a terra. In caso di dubbio non collegare l'apparecchio. Verificare che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al voltaggio ed alla frequenza indicati sulla targhetta dell'apparecchio (un'errata tensione di alimentazione può danneggiarlo senza conseguenze per l'utente). L'utilizzo dell'apparecchio non correttamente collegato alla rete elettrica può essere pericoloso. Inserire il cavetto di alimentazione nell'alloggiamento "8" facendo attenzione che sia inserito bene fino in fondo. Inserire la spina di connessione nella presa di corrente.

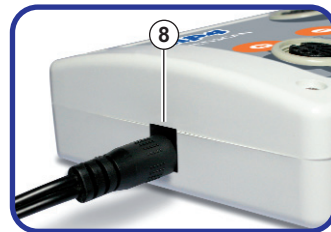

Caratteristiche tecniche

Tutti i diritti riservati

FABBRICANTE:

N&T System S.r.l. - via Beccaria, 54 - 47832 S. Clemente (RN) - ITALIA
tel. 0541 857468 - fax 0541 857653

⚠ Attenzione

Durante la manutenzione dell'apparecchio:

- non effettuare mai alcuna operazione con le mani umide o bagnate;
- non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia, utilizzare un panno imbevuto di detergente neutro non abrasivo;
- non cercare di aprire o di riparare l'apparecchio. Rivolgersi al Centro Assistenza Autorizzato per qualsiasi tipo di intervento o controllo.

OPERAZIONE DI MANUTENZIONE	PERIODICITA'	
Verifica dell'integrità del cavo di alimentazione.	M	Q
Verifica dell'integrità del cavo testina di trattamento.	M	Q
Verifica dell'integrità della testina di trattamento.	A	A
Pulizia dell'apparecchio.	S.N.	S.N.
Pulizia e disinfezione della testina di trattamento.	A	A
Calibrazione periodica	2A	2A
Verifiche elettriche dell'apparecchio.	2A	2A
UTILIZZO REGOLARE		
UTILIZZO FREQUENTE O INTENSO		

i Informazioni

Periodicità:

A Ad ogni trattamento.

M Mensile.

Q Quindicinale.

S.N. Secondo necessità.

2A Biennale.

⚠ Attenzione

La manutenzione biennale del **MP4 Multiscan** deve essere effettuata esclusivamente da **N&T System S.r.l.**

Manutenzione

i Informazioni

Per la manutenzione devono essere utilizzati esclusivamente prodotti e ricambi originali.

L'utilizzo improprio di prodotti e ricambi non originali è causa di decadimento della garanzia.

Le informazioni di questo capitolo sono fornite allo scopo di consentire all'utilizzatore di ottenere le migliori prestazioni dal **MP4 Multiscan** nelle migliori condizioni di sicurezza.

MP4 Multiscan

PULIZIA E DISINFEZIONE

Attenzione

Prima di ogni azione scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Maneggiare con cura i diffusori di trattamento. Una manipolazione non attenta può influenzare le loro caratteristiche.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Rimuovere la polvere sull'esterno dell'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito con acqua, oppure con una soluzione acquosa composta dal 75% di acqua e 25% di alcool etilico denaturato.

Attenzione

È vietato utilizzare abrasivi o prodotti chimici per la pulizia.

PULIZIA DEI DIFFUSORI DI TRATTAMENTO

Scollegare i diffusori di trattamento dall'apparecchio ed asportare i residui di crema o gel utilizzando un panno morbido inumidito con acqua, oppure con una soluzione acquosa composta dal 75% di acqua e 25% di alcool etilico denaturato. Dopo la pulizia asciugare bene ed asportare qualsiasi residuo di umidità dai diffusori di trattamento prima della conservazione o del successivo utilizzo.

Attenzione

È vietato utilizzare abrasivi o prodotti chimici per la pulizia. Durante la pulizia evitare il contatto tra il connettore e la soluzione detergente utilizzata.

DISINFEZIONE DEI DIFFUSORI DI TRATTAMENTO

Per la disinfezione dei diffusori di trattamento utilizzare un batuffolo di cotone idrofilo o una garza, imbevuti leggermente di soluzione antisettica non irritante e alcolica (ad esempio del tipo utilizzato per le piccole abrasioni o escoriazioni, disponibile in farmacia).

Attenzione

È vietato utilizzare abrasivi o prodotti chimici per la disinfezione. Durante la disinfezione evitare il contatto tra il connettore e la soluzione antisettica utilizzata. Attenersi alle indicazioni ed alle precauzioni di utilizzo fornite dal fabbricante della soluzione antisettica.

CONTROLLO DEI DIFFUSORI DI TRATTAMENTO

Ad ogni pulizia e/o disinfezione dei diffusori di trattamento ed in ogni caso al termine di ogni trattamento è necessario controllare che non presentino crepe o fessurazioni che potrebbero consentire l'ingresso di liquido conduttore. Nel caso in cui i diffusori di trattamento presentassero crepe o fessurazioni sostituirli immediatamente.

Accessori e parti di ricambio

Per eventuali ordini di accessori o parti di ricambio, consultare il catalogo accessori, richiedendolo via **e-mail** oppure consultando il **sito internet** della ditta produttrice.

Attenzione

Nella parte posteriore dell'apparecchio e sui diffusori ad ultrasuoni sono apposte le targhe identificative con riportati i dati tecnici da comunicare al Centro di Assistenza Autorizzato, al Costruttore o al Rivenditore in caso di richiesta di accessori o parti di ricambio.

Attenzione

I diffusori ad ultrasuoni di ricambio possono essere reperiti esclusivamente presso **N&T System S.r.l.** L'utilizzo di diffusori ad ultrasuoni diversi da quelli indicati può essere pericoloso.


Programmi terapeutici per l'uso dell'MP4 Multiscan

MP4 Multiscan

PATOLOGIA

MIALGIA DEL TRAPEZIO
trattare i punti trigger
o zone di dolore circoscritte


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	3 (56)

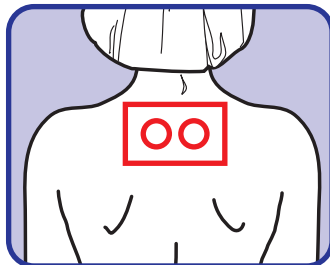

PATOLOGIA

**TENDINOPATIE
DEL CAPO LUNGO DEL BICIPITE
E DELLA CUFFIA DEI ROTATORI**


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	continua
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	5 (58)

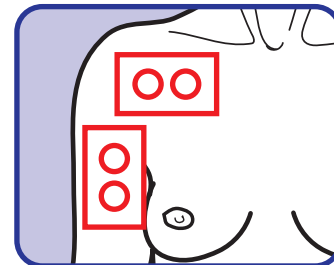

PATOLOGIA

**DOLORE ALLA REGIONE
PARASCAPOLARE**


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	4 (57)

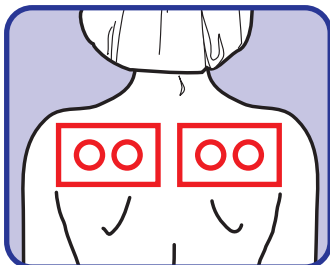

PATOLOGIA

**CAPSULITI-BORSITI
DELL'ARTICOLAZIONE
DELLA SPALLA**


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	6 (59)

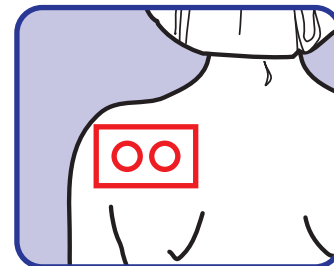

PATOLOGIA

BORSITE SOTTODELTOIDEA PATOLOGIE DEL MUSCOLO DELTOIDE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	continua
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	7 (60)

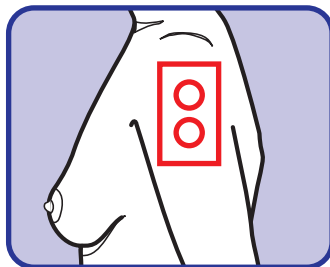

TRATTAMENTO PATOLOGIE CON

SONOFORESI

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	continua
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	11 (64)




1 - APPLICARE IL
PRODOTTO SPECIFICO
SUL CORPO
IN SOSTITUZIONE
DEL GEL ULTRASUONI

2 - APPLICARE IL
DIFFUSORE SULLA
PARTE DEL CORPO
DA TRATTARE

PATOLOGIA

PATOLOGIE MUSCOLARI DELLA CUFFIA DEI ROTATORI E DEL TRICIPITE BRACHIALE


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 80-100%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	8 (61)

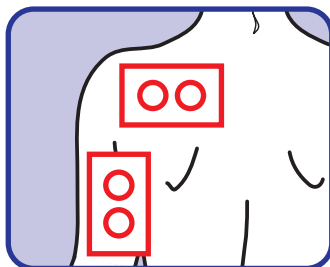

PATOLOGIA

TENDINOPATIA DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 90%
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	12 (65)

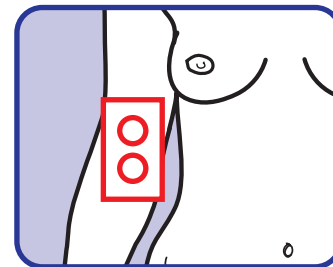


MP4 Multiscan

PATOLOGIA

BORSITE RETRO-OLECRANICA TENDINITE DISTALE DEL TRICIPITE BRACHIALE


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	14 (66)

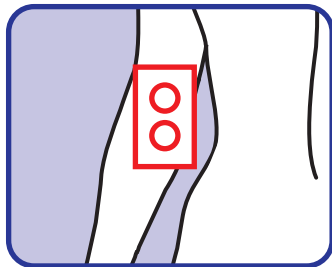

PATOLOGIA

DOLORE ALLA REGIONE SACROILIACA


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0.8 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 80-100%
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	24 (77)

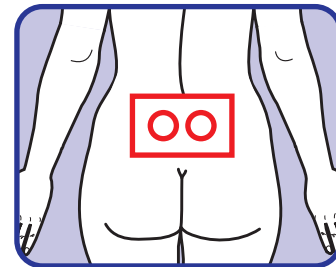

PATOLOGIA

LOMBALGIA


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	1 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 70-90%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	23 (76)

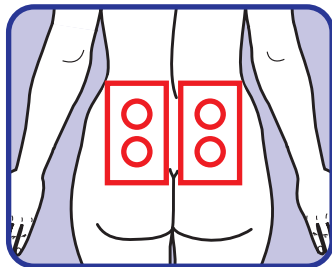

PATOLOGIA

BORSITE-ENTESITE DEL GRAN TROCANTERE DOLORE DA COXARTROSI


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	1 - 1,5 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	26 (79)

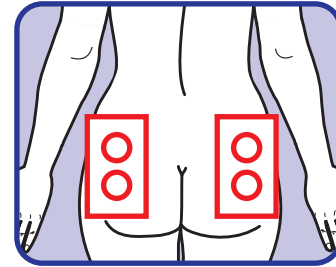

PATOLOGIA

PATOLOGIE DEL MUSCOLO QUADRICIPITE


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,8 - 1,5 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	27 (80)

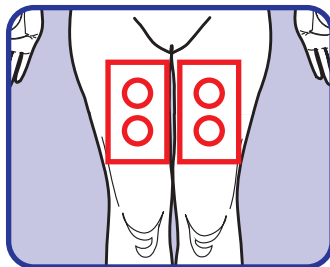

PATOLOGIA

TENDINOPATIA DISTALE DEL BICIPITE FEMORALE


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5 - 1 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	35 (83)

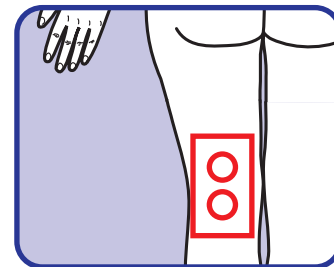

PATOLOGIA

PATOLOGIE DEI MUSCOLI FLESSORI


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5 - 1,5 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 75%
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	28 (81)

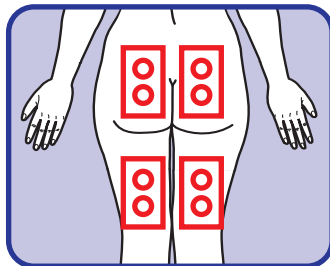

PATOLOGIA

TENDINOPATIA DEL POPLITEO

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5 - 1 W/cm ²
EMISSIONE	pulsata al 50%
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	36 (89)

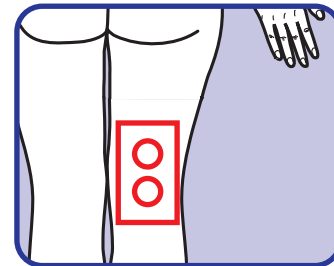


MP4 Multiscan

PATOLOGIA

PATOLOGIE DEL MUSCOLO TRICIPITE SURALE


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,8 – 1,2 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 80%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	37 (90)

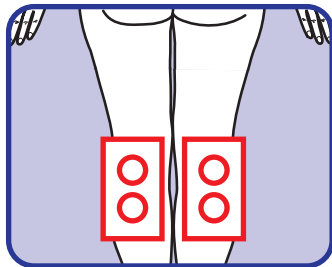

PATOLOGIA

TENDINITE DEI PERONIERI

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5 – 1 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 70%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	39 (92)

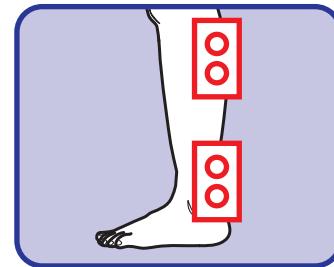


PATOLOGIA

TENDINITE PROSSIMALE DEL TIBIALE ANTERIORE

Con sonoforesi


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	0,5 – 1,2 W/cm ²
EMISSIONE	continua
DURATA max	10 minuti
PROGRAMMA	38 (91)

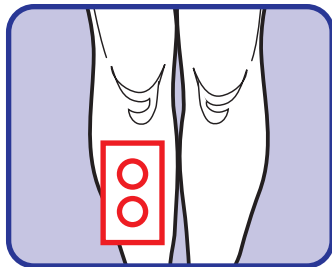

PATOLOGIA

CELLULITE ARTI SUPERIORI


FREQUENZA	1 - 3 MHz
POTENZA	1,0 - 1,5 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 50%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	47 (100)

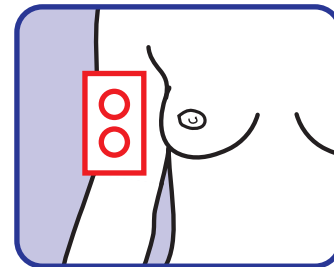

PATOLOGIA

CELLULITE ARTI INFERIORI


FREQUENZA	1 - 3 MHz
POTENZA	1,5 - 2 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	48 (101)

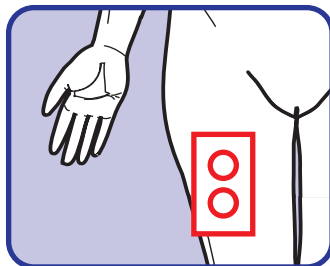

PATOLOGIA

CELLULITE GLUTEI


FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 - 2,5 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 75 - 90%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	50 (103)

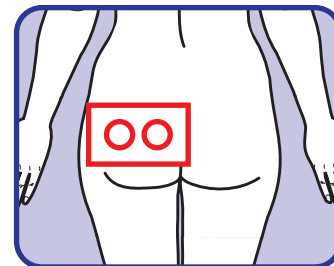

PATOLOGIA

CELLULITE ADDOME

FREQUENZA	1 MHz
POTENZA	2 - 2,5 W/cm ²
EMISSIONE	puls. 50 - 75%
DURATA max	12 minuti
PROGRAMMA	49 (102)

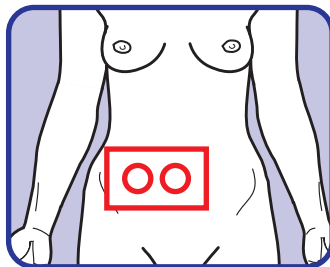

NOTE

Programmi estetici per l'uso dell'MP4 Multiscan


MP4 Multiscan

PROGRAMMA

ESTERNO BRACCIA

AZIONE


URTO	01
MODELLANTE	02
MANTENIMENTO	03

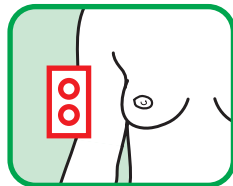

INTERNO BRACCIA

AZIONE


URTO	04
MODELLANTE	05
MANTENIMENTO	06

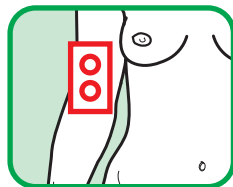

FIANCHI E SCHIENA

AZIONE


URTO	07
MODELLANTE	08
MANTENIMENTO	09

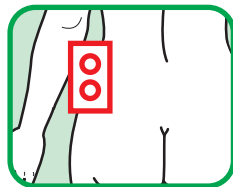

ADDOME

AZIONE

URTO	10
MODELLANTE	11
MANTENIMENTO	12

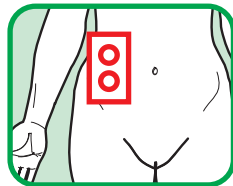


PROGRAMMA

CULOTTES CHEVAL

AZIONE


URTO	13
MODELLANTE	14
MANTENIMENTO	15

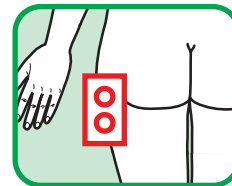

GLUTEI

AZIONE


URTO	16
MODELLANTE	17
MANTENIMENTO	18

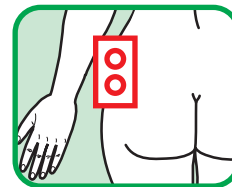

ESTERNO COSCE

AZIONE


URTO	19
MODELLANTE	20
MANTENIMENTO	21

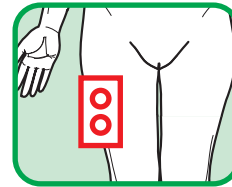


INTERNO COSCE

AZIONE


URTO	22
MODELLANTE	23
MANTENIMENTO	24

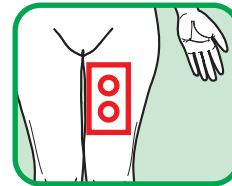


PROGRAMMA	
GINOCCHIA	
AZIONE	
URTO	25
MODELLANTE	26
MANTENIMENTO	27

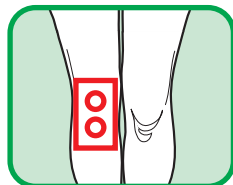


INTERNO GINOCCHIA	
AZIONE	
URTO	28
MODELLANTE	29
MANTENIMENTO	30

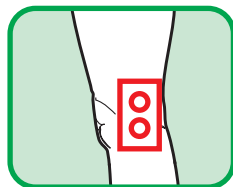


POLPACCI	
AZIONE	
URTO	31
MODELLANTE	32
MANTENIMENTO	33

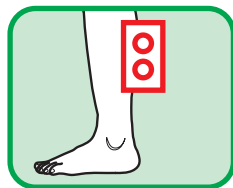


BUCCIA D'ARANCIA	
AZIONE	
DRENANTE	34
LEVIGANTE	35
MANTENIMENTO	36

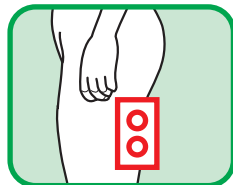


PROGRAMMA	
PELLE RUVIDA	
AZIONE	
RIATTIVANTE	37
LEVIGANTE	38
MANTENIMENTO	39

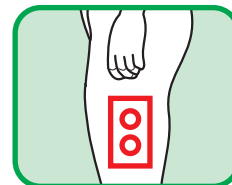

UOMO	
AZIONE	
URTO	40
MODELLANTE	41
MANTENIMENTO	42

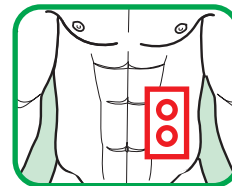

VEICOLANTE	
AZIONE	
ALTO	43
MEDIO	44
BASSO	45

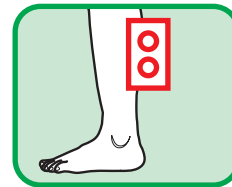

NOTE

NOTE

23



FABBRICANTE
N&T System S.r.l.
via Beccaria, 54 - 47832 S. Clemente (RN) - ITALIA
tel. +39 0541 857468 - fax +39 0541 857653

Ogni prodotto **N&T System** è oggetto di accurati controlli e viene collaudato prima di essere messo in vendita. Il consumatore è titolare dei diritti specificati dalla legislazione vigente, la garanzia non pregiudica tali diritti. La garanzia ha la durata di 24 mesi dalla data d'acquisto riportata a fianco del Timbro e Firma del Rivenditore ed è estesa a tutte le parti, ad eccezione di quelle soggette ad usura. Per eventuali interventi in garanzia il prodotto deve essere spedito ben imballato, meglio se nell'imballo originale, in porto franco (spese a carico del cliente) a:

N&T SYSTEM S.r.l. Via Beccaria, 54 - 47832 San Clemente (RN) Italia (Allegare indicazioni del difetto riscontrato). La garanzia decade qualora il prodotto **N&T System** non venga utilizzato in modo appropriato o manomesso da personale non autorizzato, oppure se il difetto non è segnalato entro due mesi dalla data in cui si è manifestato. Le parti ritenute dal Costruttore difettose all'atto della fabbricazione verranno sostituite gratuitamente. Le spese di trasporto per la restituzione del prodotto riparato sono a carico di **N&T SYSTEM**.

Certificato di Garanzia *Parte del cliente da compilare e conservare*

Codice

Modello

Numero di serie

Cognome

Nome

Via

n.

Città

CAP

Prov.

Telefono



FABBRICANTE
N&T System S.r.l. via Beccaria, 54
47832 S. Clemente (RN) - ITALIA
tel. +39 0541 857468 - fax +39 0541 857653

Certificato di Garanzia *Parte del cliente da compilare e spedire in busta chiusa*

Codice

Modello

Numero di serie

Cognome

Nome

Via

n.

Città

CAP

Prov.

Telefono

Difetto riscontrato:

ATTENZIONE: si prega di conservare il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura) al fine di certificare la data di acquisto per esercitare il diritto di garanzia in osservanza alle leggi vigenti.

Stampato in Italia