

Vesismin  
Health

CE  
0476

# NDP Air Total+ Green

Disinfezione delle  
superfici per via aerea



Gas  
ecologico



One-shot

Efficacia contro *Batteri, Funghi,  
Micobatteri ed enveloped virus*



**ISTRUZIONI DI USO:** 1. Posizionare il flacone su una superficie piana e rimuovere il sigillo. 2. Premere e girare la valvola di scarico totale. Nel formato da 50ml il prodotto genera una nube per circa 1 minuto, che copre fino a 40m<sup>3</sup>. 3. Una volta che lo scarico è completato, lasciare agire il prodotto. Applicare in assenza di persone. 4. Tempo minimo di applicazione 1 ora (se non diversamente previsto da protocolli interni). Ventilare prima di rientrare nella stanza.

**LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA ETICHETTA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO:** Rapida ed efficace disinfezione aerea di superfici di Dispositivi Medici. È un prodotto non infiammabile ed elimina gli odori sgradevoli. Solo per uso professionale. Il prodotto è **battericida** (EN1276, EN13697, EN13727), **fungicida** (EN1650, EN13697, EN13624) e **virucida** (EN 14476: H1N1) e **micobattericida** (EN14348).

### RACCOMANDAZIONI

Leggere attentamente questa etichetta e consultare la Scheda Tecnica prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare o mescolare con prodotti che contengano o che rilasciano cloro (ipocloriti). Non utilizzare con detergenti anionici. Recipiente a pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non utilizzare su fiamme vive o materiale incandescente. Tenere lontano di ogni fonte d'ignizione - Non fumare. Mantenere a temperature superiori a 0°C. Evitare il congelamento.

### PRECAUZIONI

Provoca grave irritazione oculare. Può provocare

sonnolenza o vertigini. Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi. Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione per i rifiuti pericolosi. **IN CASO DI ESPOSIZIONE o di malessere:** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conforme alla Direttiva Europea 2008/47/EC relativa agli aerosol. Contiene il 19% (in massa) di componenti infiammabili. Il prodotto finale è non infiammabile.

**COMPOSIZIONE:** Didecil dimetil ammonio cloruro (70%) 0.46%; 2-Fenosietanolo 0.10%; Aldeide dinamica 0.02%; Solventi alifatici, propellente ed eccipienti non infiammabili qsf 100%.

Data ultima revisione: 05/10/2017

Codice del prodotto: AT+GC50IT

Lot / EXP  
vedi contenitore

50 ml

3 75 e



Attenzione



EA1+GC50itv01

NDP Air Total+  
Green CE

Vesismin S.L.  
C/ Lluçà, 28 - 08028  
Barcelona, Spain  
T. +34 934 095 301  
[www.vesismin.com](http://www.vesismin.com)

Distribuito da:  
Genimpex SRL  
Via Euclide, 5nc  
20864 Agrate Brianza  
(MB)  
T. +39 5965389  
[www.genimpex.it](http://www.genimpex.it)

CE  
0476

Vesimin  
Health

# NDP Air Total+ Green

Disinfezione delle  
superfici per via aerea



Gas  
ecologico



One-shot

Efficacia contro Batteri, Funghi,  
Micobatteri ed enveloped virus



## ISTRUZIONI DI USO

1. Posizionare il flacone su una superficie piana e rimuovere il sigillo.



2. Premere e girare la valvola di scarico totale. Nel formato da 300ml il prodotto genera una nube per circa 3 minuto, che copre fino 150m<sup>3</sup>.



3. Una volta che lo scarico è completato, lasciare agire il prodotto. Applicare in assenza di persone.



4. Tempo minimo di applicazione 1 ora (se non diversamente previsto da protocolli interni). Ventilare prima di rientrare nella stanza.

## LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA ETICHETTA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

Rapida ed efficace disinfezione aerea di superfici di Dispositivi Medici. È un prodotto non infiammabile ed elimina gli odori sgradevoli. Solo per uso professionale. Il prodotto è **battericida** (EN1276, EN13697, EN13727), **fungicida** (EN1650, EN13697, EN13624) e **virucida** (EN 14476: H1N1) e **micobattericida** (EN14348).

## RACCOMANDAZIONI

Leggere attentamente questa etichetta e consultare la Scheda Tecnica prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare o mescolare con prodotti che contengano o che rilasciano oro (ipocloriti). Non utilizzare con detergenti anionici. Recipiente a pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non utilizzare su fiamme vive o materiale incandescente. Tenere lontano di ogni fonte d'ignizione - Non fumare. Mantenere a temperature superiori a 0° C. Evitare il congelamento.

Conforme alla Direttiva Europea 2008/47/EC relativa agli aerosol. Contiene il 19% (in massa) di componenti infiammabili. Il prodotto finale è

non infiammabile.

## PRECAUZIONI

Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi. Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione per i rifiuti pericolosi. IN CASO di esposizione o di malessere: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

## COMPOSIZIONE

Didecil dimetil ammonio cloruro (70%) 0.46%; 2-Fenossietanolo 0.10%; Aldeide cinnamica 0.02%; Solventi alifatici, propellente ed eccipienti non infiammabili qsf 100 %.

Data ultima revisione: 05/10/2017

Codice del prodotto: AT+GC300IT

Lot / EXP  
vedi contenitore

NDP Air Total+ Green CE

Vesimin S.L.

C/ Lluçà, 28 - 08028 Barcelona, Spain  
T. +34 934 095 301 - [www.vesimin.com](http://www.vesimin.com)

Distribuito da:  
**Genimpex SRL**  
Via Euclide, Snc  
20864 Agrate Brianza (MB)  
T. +39 5965389  
[www.genimpex.it](http://www.genimpex.it)



Attenzione

300 ml

3 405 e



EAAT+GC300itv01