


KM03

Materasso in espanso composito con sponde di contenimento laterali



Destinazione d'uso:

Prevenzione delle piaghe da decubito.

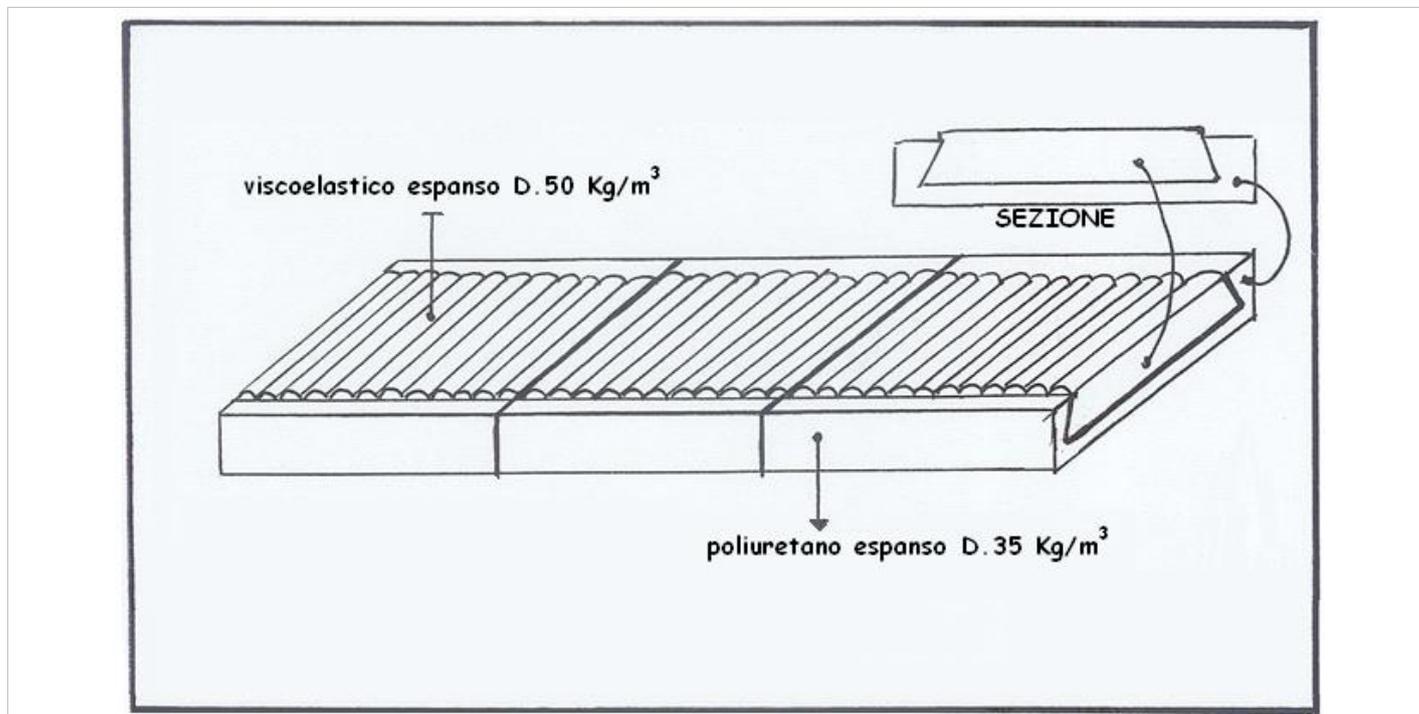

Modalità d'impiego:

Posizionare il dispositivo sul letto con la parte lavorata rivolta verso l'utente.

Si consiglia di interporre un fodero fra il dispositivo e l'utente.

Manutenzione e pulizia:

Si consiglia il lavaggio con acqua e detersivi con l'accorgimento di introdurre nella lavatrice lo stesso arrotolato e legato. La strizzatura può essere eseguita sia con mangano sia in centrifuga a bassa velocità. L'asciugatura può avvenire in una camera, non soleggiata, a correnti d'aria o con stufa a circolazione d'aria (temperatura massima 70° C.). Trattamento in autoclave con vapore acqueo saturo a temperatura max. di 106° C. per massimo dieci minuti.

Avvertenze e precauzioni:

- Si consiglia l'uso ad un solo utente.
- Utilizzare e conservare in posizione orizzontale.
- Il materasso KM03 deve essere conservato e utilizzato lontano da fiamme libere e fonti di calore.
- Il dispositivo deve essere sanificato prima dell'eventuale riutilizzo.
- Il materasso KM03 è estremamente sensibile all'aria e alla luce. Si consiglia un fodero di rivestimento integrale. L'eventuale perdita di colore dei componenti non pregiudica l'efficacia del materasso.
- Non si è a conoscenza di eventuali effetti collaterali.

Modalità di smaltimento:


Alla fine della sua vita utile il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato

KM03

**Materasso in espanso composito con
sponde di contenimento laterali**



presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse.

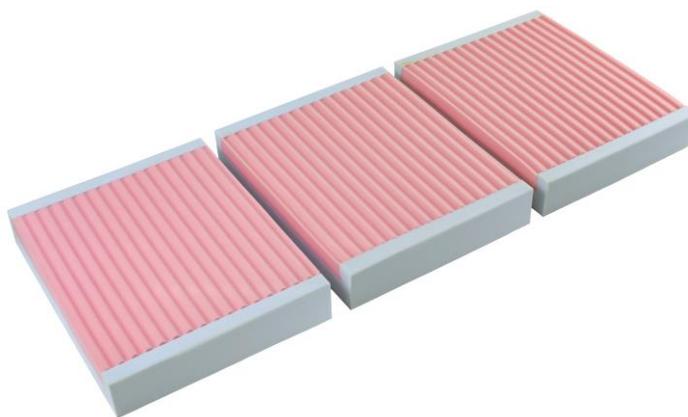

Codice e misure disponibili

	lunghezza	larghezza	altezza	peso	n° repertorio
KM0319508014	195 cm	80 cm	14 cm	8,5 kg	6308/R
KM0320009014	200 cm	90 cm	14 cm	10 kg	336804/R
KM0320012014	200 cm	120 cm	14 cm	13 kg	336807/R